

## 产品介绍

### 产品名称：多功能活性氧消毒器

**产品功能：**通过电晕法产生活性氧，利用活性氧杀菌彻底、无残留、杀菌广谱的特点，给物品和空间等进行杀菌消毒。

#### 使用说明：

- 1、长按电源键开机。屏幕默认显示30min倒计时；机器运行普通消毒模式，蓝色O3图标闪烁开始产生活性氧消毒；
- 2、短按电源键，切换常规消毒30min、快速消毒20min、长效消毒60min定时；
- 3、短按风扇按键，可切换强力消毒模式，橙色强风图标闪烁；
- 4、常规30min定时和长效60min定时模式下，机器运行到最后10分钟（快速消毒20min定时模式下最后5分钟），活性氧自动关闭，绿色风扇图标转动，风扇输送新鲜空气，去除活性氧残留；
- 5、消毒定时时间结束，机器屏幕显示时间为“00”，5秒后蜂鸣器“嘀-”长音后自动关机；
- 6、电池电量不足情况下，开机电池图标显示红色，蜂鸣器“嘀-嘀-嘀”三声报警后自动关机，请及时插上充电器给机器充电；
- 7、机器运行过程中，如果电池电量不足，蜂鸣器“嘀-嘀-嘀”三声报警后自动关机，此时请插上充电器给机器充电。



## 产品特点

## 产品特点

- 1、1.77吋TFT LCD彩色屏幕，显示更直观，操作更方便；
- 2、横向独立风道设计，把活性氧和内部电路独立区分，可以避免内部电路和器件被氧化，机器更耐用；
- 3、带风扇，风力大小可调，强力消毒模式下，可以增加活性氧排放浓度，消毒更彻底，效果更好；
- 4、2600mAh可充电锂电池，Type-C充电接口，电池更耐用，充电更快捷；
- 5、常规消毒30分钟、快速消毒20分钟、长效消毒60分钟三档定时，可根据需要自由切换；
- 6、搭配专用消毒袋使用。消毒袋出风口有专业过滤网设计，避免过多活性氧排放到室内。使用更健康更放心。





## 核心应用：家用CPAP呼吸机消毒

呼吸机内部、湿化器、管路、面罩上容易滋生大量病菌。通过呼吸机高压气流与空气一起，直接进入人体肺泡组织并沉积，经循环系统转移至其他器官，对人体产生严重危害。

### CPAP呼吸机内大量细菌和病毒产生的原因：

- 1.大部分呼吸机抽取室内空气的位置不仅限于进气口，没有过滤棉阻隔的外壳接口处或底部缝隙同样可以进气---导致细菌进入；
- 2.为了尽量降低噪音，呼吸机的风机周围包裹了大量不可清洁的隔音棉---成为细菌的培养区；
- 3.为了防止大量灰尘直接进入气道，呼吸机内风机进气通道口覆盖了不可清洁的过滤棉---成为细菌培养区；
- 4.为了更小和轻便，大部分呼吸机不会将气路和电路分开，细菌可以轻易降落到温暖的电路板和风叶上---成为细菌的繁殖床；
- 5.呼吸机长时间工作会发热，内部保护层多导致散热差---为细菌提供了最佳繁殖温度（5°C~20°C）。
- 5.通常呼吸机厂家提供的过滤棉仅能过滤灰尘而不能过滤细菌，相反灰尘的积累且不能清洁---提供给细菌大量美食。在合适的条件下，保守估计每天病菌数量增加100万倍（假设停机16小时），因为病菌繁殖速度通常为15-45分钟一代。



## 产品应用

### CPAP呼吸机消毒

专为呼吸机消毒设计：出气端口与CPAP呼吸机管路完美对接。利用活性氧对最容易滋生细菌和病毒的机器内部进行深入消毒；同时也可以对呼吸管路、面罩等其他配件进行消毒

#### 1、呼吸机管路和面罩消毒：

把呼吸管路和面罩放入专用消毒袋，用转接头连接消毒器与消毒袋，打开机器，设置相应时间进行消毒。建议使用常规消毒30min模式，每周消毒两次。

#### 2、呼吸机内部消毒：

用转接头把呼吸机和消毒器连接，打开机器，设置相应时间进行消毒。建议使用常规消毒30min模式，每周消毒两次。

Clean Your Mask or Machine  
Separately





## 产品应用

### 3、呼吸机和管路、面罩同时消毒：

把呼吸面罩放入消毒袋，使用T型三通转接头，把呼吸机和消毒袋同时与消毒器连接，打开机器，设置相应时间进行消毒。建议使用常规消毒30min和强力消毒模式，每周消毒两次。

## Clean Your Mask or Machine Simultaneously



## 产品应用

### 其他应用：日常家居用品消毒

搭配消毒包使用，可以给日常家居用品，如贴身衣物、玩具、化妆用具、首饰、眼镜、手机等物品进行消毒。

#### 使用方法：

把需要消毒的物品放入消毒袋，用转接头连接消毒器和消毒袋，打开机器，设置相应时间，即可进行消毒。建议使用常规消毒30min或者快速消毒20min模式，随时按需使用。

## Multi Function

Disinfect your underwear, baby's toys, make-ups, cell phones, etc. or sanitizing for large space, like car, wardrobe, etc






## 产品应用

### 其他应用：常规空间消毒

车内、衣柜、鞋柜、冰箱、卫生间等空间消毒除味。

#### 使用方法：

开启机器，设置定时时间，放入相应区域空间即可开始消毒。在车内消毒，请确保人员离场。可以根据空间大小，使用常规消毒30min或者长效消毒60min模式，随时按需使用。

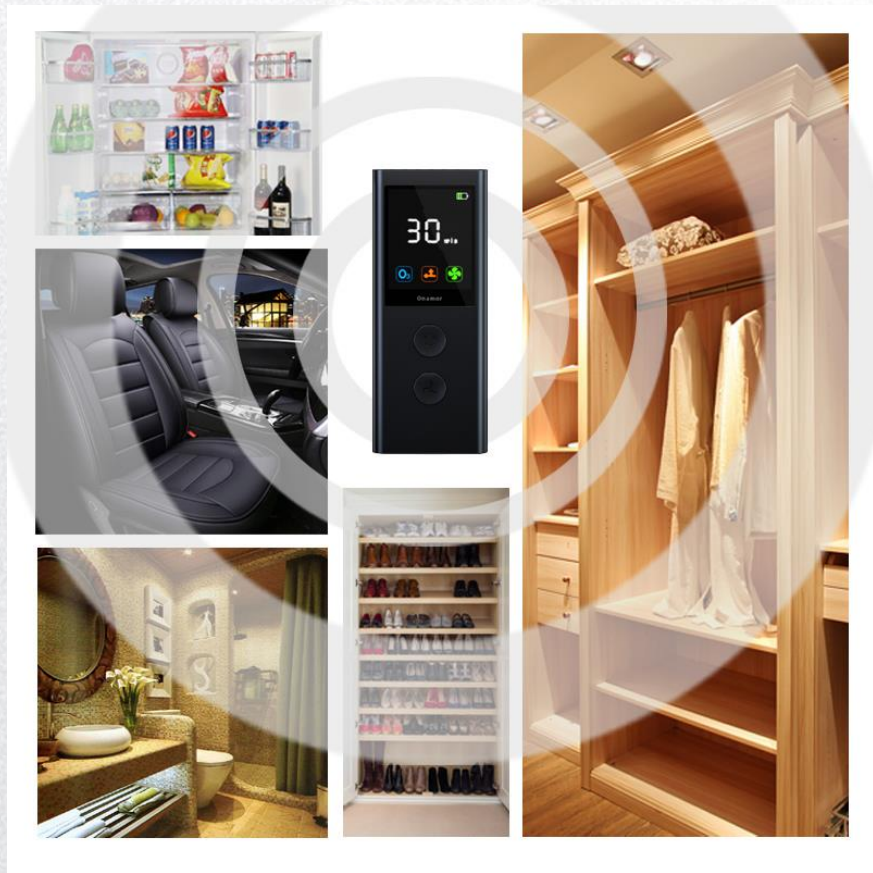

## 产品规格

## 产品规格

**名称：多功能活性氧消毒器**

型号：NM-001

尺寸：120 \* 50 \* 50 mm (4.72 \* 1.97 \* 1.97 inches)

净重：195g

电池容量：2600mAh

功率：4W

输出：DC 5V 2A

活性氧浓度：5mg/h

认证: CE FCC RoHS Certified

### 配套器件：

专用消毒包

5V/2A充电器

USB Type-C数据线

T型三通转接头

小型直通转接头

常规直通转接头

